

GUIDA RAPIDA Italiano



www.miyoworld.eu

Per un inizio perfetto.



PREPARAZIONE & ISTRUZIONI D'USO



Preparazione

- La superficie deve essere pulita e priva di contaminazione superficiale prima di applicare il materiale.
- La superficie può essere sabbiata con una pressione di 2 bar a 50 µm.

Istruzioni d'uso

- Non versare il liquido nei contenitori delle masse. Prendere la pasta e mescolarlo col liquido in una piastra.
- Mescolare accuratamente MiYO Color, MiYO Structure e Glaze Paste con una spatola non metallica prima di ogni utilizzo.
- Tutti i ricambi MiYO e glaze paste non devono entrare in contatto con acqua.
- Utilizzare sempre un pennello pulito e asciutto.

Applicazione

- Applicare il materiale sulla superficie preparata in base allo scopo e all'effetto desiderato.

Stoccaggio e smaltimento

- Conservare in luogo asciutto.
- Un quantitativo ridotto può essere depositato nei rifiuti domestici.

**MESCOLARE ACCURATEMENTE
MIYO COLOR, STRUCTURE E GLAZE PASTE
CON UNA SPATOLA NON METALLICA.**



**TROVATE ULTERIORI
INFORMAZIONI NELLA
VOSTRA LINGUA
SULLA CHIAVETTA USB**



TABELLA DI COTTURA & GRAFICI COTTURA



Parametri di cottura*	COLOR STRUCTURE GLAZE PASTE FIRING			
	ZrO ₂	InSync Zr	Disilicato di Litio	Press to Zircon
Temperatura iniziale [°C]	400 - 450	400 - 450	400 - 450	400 - 450
Asciugatura [min]	3	3	3	3
Tempo di chiusura [min]	4	4	4	4
Incremento termico 1 2 [°C/min]	45	45	45	45
Mantenimento 1 [s]	30 - 45	30 - 45	30 - 45	30 - 45
Inizio vuoto [°C]	580	580	580	580
Temperatura finale [°C]	720	720	710	720
Fine vuoto [°C]	720	720 <td 710	720	
Mantenimento 2 [s] **	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Tempo d'apertura [min]	1	1	1	1

* Le temperature di cottura sono valori standard e possono variare a seconda del tipo di forno e delle dimensioni (volume) del restauro.

** In base al grado di lucentezza desiderato, il tempo di mantenimento è di 30 - 60 secondi.

HT STRUCTURE FIRING	
ZrO ₂	InSync Zr
400 - 450	400 - 450
3	3
4	4
45	45
30 - 45	30 - 45
600	600
775	775
775	775
60	60
1	1

Maggiori informazioni nel portale clienti:





www.miyoworld.eu/it/



Grafici cottura

Regolazione dei parametri di cottura in base alle dimensioni del restauro. Per i dettagli vedere Workbook pag.17. Nota: avvio posticipato del vuoto!

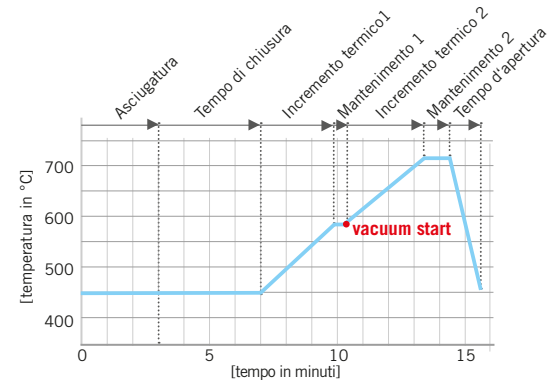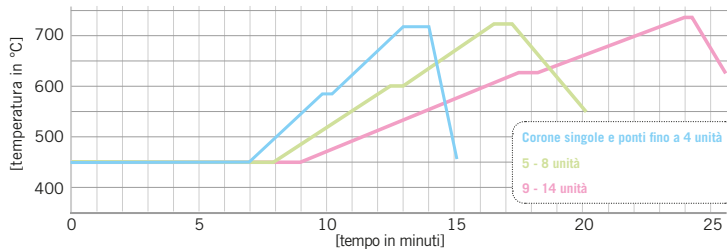

FORMAZIONE & SUPPORTO



Video di formazione, programmazione del forno...

Nel portale clienti ti forniamo materiale informativo esclusivo. Scopri come utilizzare in sicurezza MiYO e MiYO pink con l'aiuto del video di formazione - disponibili in diverse lingue. Istruzioni di cottura e note sulla programmazione del forno per aiutarti a programmarlo al meglio.

Registrazione: www.miyoworld.eu/it/login

Per la registrazione hai bisogno del numero del Kit MiYO, quest'ultimo lo troverai sul retro della Guida Rapida e nel Kit MiYO sotto il liquido.



Sei interessato all'acquisto del MiYO?

Contattaci ai seguenti indirizzi:

**FORNITURE DENTALI CASOTTO DI
CAPUZZO ENRICO & C. SNC**

Mail: forniturecasotto@gmail.com
Whatsapp: 349 7217730
Tel: 049 8805239

Saremo lieto di indicarvi il ca. dealer di zona!



Manuale d'istruzione

Tutti i documenti relativi a MiYO, MiYO pink e glaze paste sono disponibili per il download nel nostro sito.

www.miyoworld.eu/it/download



Supporto

Avete dubbi o domande sul sistema MiYO?
Si prega di mettersi in contatto con noi.

E-Mail: forniturecasotto@gmail.com
Tel: 049 8805239
Cell: 349 7217730
www.miyoworld.eu/it/supporto



Formazione individuale & corsi

Contattateci per formazione individuale e corsi sul sistema MiYO.

E-Mail: forniturecasotto@gmail.com
Tel: 049 8805239
Cell: 349 7217730



LISTINI PREZZI

MiYO

Articolo	Art.no.	Prezzo €
TRANSLUCENT 4g		
Trans Shade A	0877	43,00
Trans Shade B	0878	
Trans Shade C	0879	
Trans Shade D	0880	
Trans Straw Fluor	0862	
Trans Sage Fluor	0893	
Trans Lotus Fluor	0861	
Trans Clementine Fluor	0863	
Trans Storm Fluor	0860	
Trans Cobalt Fluor	0894	
Trans Smoke Fluor	0875	
Trans Slate Fluor	0895	
Trans Lumin Fluor	0876	
Trans Lumin Plus Fluor	0896	
Trans Sunflower Fluor	0950	
Trans Garnet	0952	
MAMELON 4g		
Mamelon Wheat Fluor	0866	43,00
Mamelon Coral Fluor	0867	
Mamelon Pumpkin Fluor	0868	
HALO 4g		
Halo Spring Fluor	0864	43,00
Halo Autumn Fluor	0865	
COLOR 4g		
Snow Fluor	0857	43,00
Linen Fluor	0858	
Fissure Fluor (Pulver)	0859	

Articolo	Art.no.	Prezzo €
STRUCTURE 4g		
Structure Window Fluor	0869	48,00
Structure Ghost Fluor	0873	
Structure Enamel Fluor	0872	
Structure Ice Fluor	0870	
Structure Blush Fluor	0871	
HT STRUCTURE 4g		
HT Structure Enamel Fl.	0953	48,00
HT Structure Window Fl.	0954	
GLAZE PASTE 4g		
InSync Glaze Paste Fluor	0819	39,00
STAIN / GLAZE LIQUID INSYNC one-for-all		
Stain / Glaze Liquid 25ml	0800/25	11,60
Stain / Glaze Liquid 50ml	0800/50	23,00
MiYO Kit		
18 x MiYO Color 5 x MiYO Structure 1 Glaze Paste 1 Stain / Glaze Liquid 25 ml	0881- MiYO Kit	990,00
MiYO Kit Color+		
22 x MiYO Color 2 x MiYO Structure 1 Glaze Paste 1 Stain / Glaze Liquid 25 ml	0881- MiYO Kit Color+	990,00

Il listino prezzi è valido dal 01.04.2021.
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e spese di spedizione.
Salvo errori e omissioni. Si applicano le
Condizioni generali di Jensen GmbH.

MiYO
pink

Articolo	Art.no.	Prezzo €
TRANSLUCENT 4g		
Trans Raspberry	0887	43,00
Trans Copper	0888	
Trans Midnight	0883	
Trans Carnation	0951	
Trans Garnet	0952	
COLOR 4g		
Flamingo	0881	43,00
Crimson	0882	
Plum	0884	
Merlot	0885	
Sorbet	0886	
Salmon	0889	
Sable	0897	
Thistle	0898	
Venule (Pulver)	0957	
STRUCTURE 4g		
Structure Orchid	0890	48,00
Structure Rouge	0891	
Structure Frost	0892	
GLAZE PASTE 4g		
MiYO Glaze Paste No Fluor	0821	39,00
STAIN / GLAZE LIQUID INSYNC one-for-all		
Stain / Glaze Liquid 25ml	0800/25	11,60
Stain / Glaze Liquid 50ml	0800/50	23,00
MiYO pink Kit		
11 x MiYO pink Color 3 x MiYO pink Structure 1 MiYO Glaze Paste No Fluor 1 Stain/Glaze Liquid 25 ml	0881- MiYO pink	599,00



Registratevi al portale clienti e ottenete maggiori informazioni

In qualità di cliente MiYO, avete accesso esclusivo al portale clienti. A tal fine, è necessario registrarsi sul sito www.miyoworld.eu alla voce LOGIN > REGISTRAZIONE PORTALE CLIENTI
Per la registrazione è necessario il numero di Kit MiYO.

*Il numero del kit MiYO è
riportato sul coperchio della
confezione e sotto il flacone
del liquido.*



www.miyoworld.eu/it/login/registrazione



Prodotto da:
Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com
www.chemichl.com



Vendite e assistenza tecnica in Europa:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
Tel. +49 7123 92260
Mail: info@jensendental.de
www.miyoworld.eu

Importatore in Italia:

FORNITURE DENTALI CASOTTO
DI CAPUZZO ENRICO & C. SNC
Via C.Anconitano, 10 - 35124 Padova
Tel: 0498805239 Cell: 3497217730
Mail: forniturecasotto@gmail.com
www.fornituredentalicasotto.com